

Orbisana Massagepistole mit Wärme- und Kältetherapie


Art.-Nr. 146598189

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

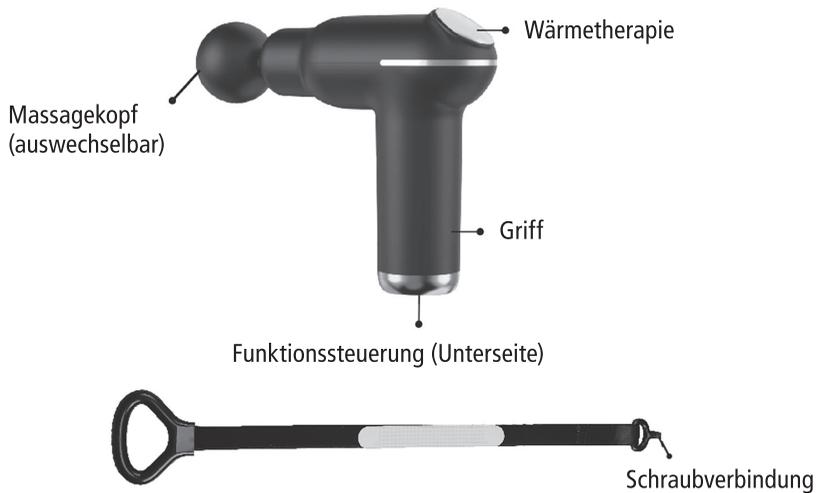

Geeignet für Rücken, Taille, Bauch und Arme.

Massageköpfe



Kälte-Aufsatz
Der Kältetherapiekopf mit Silica-Gel ist wohltuend z.B. bei Muskelentzündungen. Vor der Anwendung den Aufsatz einfach rund 10 Minuten in den Kühlschrank legen (aber nicht in den Gefrierschrank bzw. nicht ins Gefrierfach).



Trigger-Aufsatz
Geeignet für die Behandlung von tief liegendem Gewebe, Akupunkturpunkten und Gelenken.



Kugel-Aufsatz
Für die Massage verschiedener, größerer Muskelpartien geeignet, z.B. Handfläche, Oberschenkel, usw.




Gabel-Aufsatz
Geeignet für Schulter, Achillessehne, Halswirbelsäule und seitliche Muskeln. (Halswirbelsäule und Wirbelsäule können nicht direkt behandelt werden, - Verletzungsgefahr.



Flach-Aufsatz
Geeignet für die Massage von großen Muskelgruppen, Beinen, Hüften und anderen Tiefenstimulationen.

Bedienung der Massage- und Wärmefunktion

- Nutzungsfunktion: Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten, und drücken Sie dann , um die Zirkulationsstärke des Massagegeräts in 5 Stufen einzustellen. Wählen Sie mit die gewünschte Wärme in fünf Stufen.
- Stufe 1: 50 °C
- Stufe 2: 54 °C
- Stufe 3: 57 °C
- Stufe 4: 59 °C
- Stufe 5: 63 °C

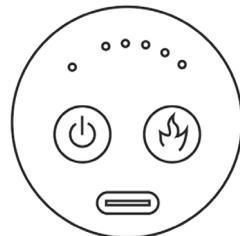


2. Inbetriebnahme / Aufbau

Massageköpfe / Massageband installieren

Bitte installieren oder entfernen Sie den Massagekopf und das Massageband nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Dazu gehen Sie wie folgt vor:


Massageköpfe

- Wählen Sie den passenden Massagekopf nach Ihren Bedürfnissen.
- Setzen Sie den Massagekopf wie unten gezeigt in das Massagegerät ein.
- Beim Herausnehmen drehen Sie den Massagekopf und ziehen ihn dann heraus.

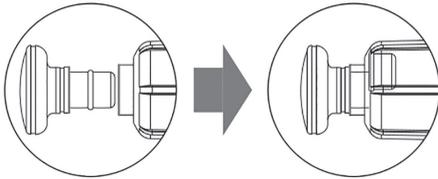

Massageband

- Drehen Sie das Massageband mit dem Gewinde in das Massagegerät und befestigen Sie es am Ende wie unten gezeigt.
- Beim Herausnehmen drehen Sie das Massageband gegen den Uhrzeigersinn und nehmen es heraus.

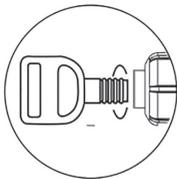


Akku Laden

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung drei Stunden lang vollständig auf.
- Schließen Sie beim Laden das USB-Ladekabel an den Ladeanschluss des Geräts an und stecken Sie dann den USB-Ladeadapter in die Steckdose.
- Die LED am Akku blinkt regelmäßig und zeigt den Akkustand an, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.
- Wenn alle LEDs aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Der Akku kann jederzeit und bei beliebigem Ladestand aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, den Akku bis zur roten LED-Stufe zu entladen. Bitte laden Sie den Akku bereits bevor er diese Stufe erreicht hat.
- Die durchschnittliche Betriebszeit des Geräts beträgt zwei Stunden, abhängig von dem während der Benutzung ausgeübten Druck.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Massagebereiche als Referenz

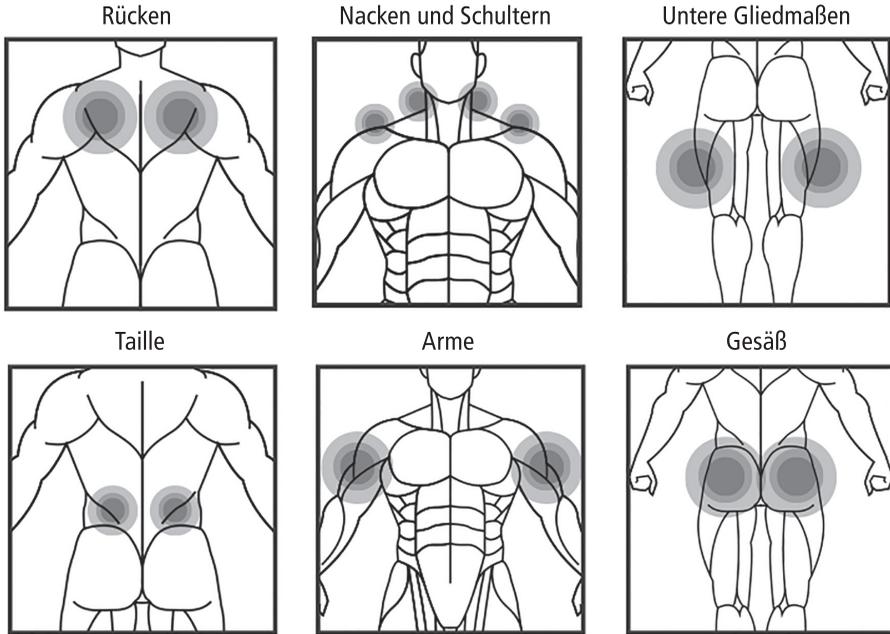

4. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den kommerziellen oder medizinischen Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nur für gesunde Erwachsene, bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Körperteilen, die Verletzungen aufweisen. Beenden Sie die Anwendung umgehend, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren.
- Wenden Sie das Massagegerät auf die Weichteile des Körpers an, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen, z.B. auf Muskeln, Sehnen, Bänder und Faszien.
- Wenn das Massagegerät starken Druck oder Schläge ausübt, können Blutergüsse entstehen. Überprüfen Sie den Massagebereich regelmäßig, und beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Entzündungen, Schwellungen oder verstärkte Schmerzen auftreten.
- Verwenden Sie das Massagegerät auf trockenen und sauberen Körperstellen und drücken und bewegen Sie es sanft, ohne große Kraftanstrengung.
- Um Quetschungen zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft oder der Rückseite des Massagekopfes ferngehalten werden müssen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an und in der Nähe von empfindlichen Körperteilen wie Kopf, Gesicht, Halswirbeln, Wirbeln, Fortpflanzungsorganen, Bändern, Prothesen usw.
- Vermeiden Sie bitte übermäßigen Druck und übermäßigen Gebrauch dieses Produkts. Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Bitte überprüfen Sie das Hauptgerät und das Ladekabel vor dem Gebrauch. Sollte das Gerät beschädigt sein, tauschen Sie es bitte beim Hersteller oder einer qualifizierten Fachwerkstatt aus. Um Gefahren zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht selbst zerlegen und reparieren.
- Personen, die an Aneurysmen, Blutungen, Krebs, Herzkrankheiten oder Knochenbrüchen leiden, sowie Säuglinge, schwangere Frauen und Personen, die ein Herzrhythmusgerät tragen oder Metallteile in ihrem Körper haben, sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wärmefläche des Geräts ist heiß. Personen, die hitzeempfindlich sind, sollten bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.



Berühren Sie diese Stelle nicht, wenn Sie das Gerät ohne installierten Massagekopf einschalten.



Berühren Sie diese Stelle nicht, wenn Sie das Gerät mit installiertem Massagekopf einschalten.

Warnungen und Vorsichtshinweise

- Legen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht und halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, Hitze und Feuer fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung (z. B. in einem Badezimmer), um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.
- Wählen Sie den passenden Massagekopf entsprechend Ihren Bedürfnissen. Wenden Sie den Massagekopf nicht über längere Zeit an derselben Stelle an.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um Schäden an Muskeln und Weichteilen zu vermeiden. Darüber hinaus aktiviert das Gerät bei übermäßigem Druck den Schutzmechanismus und schaltet sich ab. Um es weiter zu benutzen, warten Sie bitte 3 Sekunden und starten das Gerät dann erneut.

- Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden haben, beenden Sie diese bitte umgehend.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder aufgeladen wird.
- Nachdem Sie das Gerät 30 Minuten lang ununterbrochen benutzt haben, schalten Sie die Stromversorgung für 5 bis 10 Minuten aus, um die Lebensdauer zu verlängern und die Sicherheit zu gewährleisten. Danach können Sie das Gerät wieder einschalten.
- Dieses Produkt kann nicht in Betrieb genommen werden, während es aufgeladen wird.

Sicherheitshinweise für Akkus und Batterien

- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder in einer sehr heißen Umgebung auf.
- Wenn der Akku zu schwach ist und über einen längeren Zeitraum nicht aufgeladen wird, schaltet der Akku in den Schutzmodus. Das Gerät lässt sich dann nicht mehr einschalten und die Funktionsweise ist gestört.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku einmal im Monat aufzuladen, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn der Akku einen seltsamen Geruch verströmt, sich erwärmt, verformt oder andere Anomalien aufweist.
- Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um elektrischen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, Wartung und Reparatur.
- Prüfen Sie vor dem Ladevorgang, ob die verwendete Spannung in Ihrem Haushalt mit der Betriebsspannung des Ladegeräts übereinstimmt.

5. Lieferumfang

- Massagepistole
- USB-Ladekabel
- Massageköpfe (6 Stück)
- Aufbewahrungsbox

6. Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie es reinigen.
- Bitte verwenden Sie keine chemischen Produkte, Waschmittel und andere Reinigungsmittel zum Säubern dieses Geräts.
- Zum Reinigen wischen Sie die Massagepistole lediglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Fehlersuche

Fehler	Ursache	Lösung
Leichtes Störgeräusch während des Betriebes.	Dies ist das normale Funktionsgeräusch der mechanischen Baukonstruktion dieses Geräts.	Keine Sorge. Es handelt sich nicht um einen Produktfehler.
Gerät lässt sich nicht einschalten.	a) Gerät ist wurde nicht eingeschaltet. b) Akku ist schwach oder ganz leer. c) Das Gerät ist während des Ladevorgangs automatisch abgeschaltet und kann nicht eingeschaltet werden.	a) Halten Sie die Betriebstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. b) Laden Sie den Akku vollständig auf. c) Schalten Sie das Gerät erst dann wieder ein, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Die Faszienmassage kann nicht aktiviert werden.	Wenn die Wärmefunktion aktiviert ist, schaltet sich die Faszienmassage automatisch ab.	Schalten Sie die Faszienmassage wieder ein.
Das Gerät schaltet sich während des Betriebs abrupt aus.	a) Betriebstaste wurde zufällig berührt. b) Akku ist schwach oder ganz leer.	a) Schalten Sie das Gerät wieder ein, indem Sie die Betriebstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. b) Laden Sie den Akku vollständig auf.
Der Akku lässt sich nicht laden.	a) Schmutz im Ladeanschluss oder das Ladekabel ist nicht eingesteckt. b) Das USB-Ladegerät liefert keinen Strom. c) Der Akku ist zu alt oder andere Teile sind defekt.	a) Reinigen Sie den Ladeanschluss und stecken Sie das Ladekabel ein. b) Prüfen Sie, ob der Ausgang des USB-Ladegeräts genügend Strom liefert. c) Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Achtung: Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn eine Störung auftritt.

8. Entsorgung

- Bevor Sie das Gerät entsorgen, müssen Sie den Akku aus dem Gerät entfernen.
- Wenn Sie den Akku entnehmen, muss das Gerät unbedingt vorher ausgeschaltet werden.
- Batterien und Akkus, die beschädigt wurden oder nicht mehr aufgeladen werden können, müssen als Gefahrenmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese in die nächstgelegene Recycling-Einrichtung. Schaden Sie bitte niemals unserer Umwelt.
- Werfen Sie alte und verbrauchte Akkus und Batterien niemals in den Hausmüll oder in Feuer oder Wasser.
- So entnehmen Sie den Akku: Drehen und schrauben Sie den Massagekopf ab, öffnen Sie den runden Zierring, entfernen Sie die beiden Schrauben, heben Sie dann die Zieraufkleber in der linken und rechten unteren Ecke ab, entfernen Sie die beiden Schrauben, öffnen Sie das Gehäuse und nehmen Sie den Akku heraus.

9. Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V DC
- Leistung: 24 W
- Ladespannung: 5 V DC
- Ladestrom: 1 A
- U/min: 1.800, 2.150, 2.500, 2.850, 3.200
- Ladedauer: 2-3 Std.
- Betriebsdauer: 1-2 Std.
- Akkuspannung: 7,4 V DC
- Akkukapazität: 1.800 mAh
- Material: ABS
- Maße (L x H): 17 x 12 cm

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland Telefon: 0821/90 069 959 E-Mail: info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz Telefon: 0848/810 810 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich Telefon: 0662/939 0 939 E-Mail: kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)